

ペイシエントウォッチャープラスについて

ペイシエントウォッチャープラスは、
赤外線カメラを使用した見守りロボットです。

【ペイシエントウォッチャープラスの特徴】

介護スタッフ様の負担軽減

インターネットを使用しており、いつでもどこからでもリアルタイムにご利用者の様子を確認する事が出来ます。その為訪室回数が減り介護スタッフ様の負担を軽減します。

転倒・落下および徘徊の事前防止

画像を解析してご利用者の動きを音とアイコンでお知らせします。お知らせ内容は1人1人に合わせて設定が可能で、施設様のナースコールに接続してお知らせも可能です。

映像によるエビデンス

録画用のメモリがついており約4日分の録画が可能です。録画データはお持ちのパソコンで再生することができます。
※貸出終了後データは削除します

簡単に始められる

設置は事前準備の必要はなく専用スタンドで簡単に行えます。お部屋やご利用者様を変更される際も簡単に移動できます。



【ご利用までの流れ】

設置及び回収時は弊社スタッフがお伺いして対応いたします。

事前確認

- 施設様のネット環境等、事前の確認と打合せをさせていただきます

設置

- お伺いさせていただき、専用スタンドにて設置いたします

初期設定

- PCやタブレット等でご確認いただけるように設定いたします

ご利用開始

- 初期設定が完了すればすぐにご利用いただけます



ペイシェントウォッチャープラスについて

【事前の確認事項】

ご利用いただく上での必須環境・ご確認事項がございます。

ソフトバンクのLTE電波が問題なく届いている必要がございます

本体はソフトバンクのLTE電波（スマホの電波）を使用して動きます。
ソフトバンクのサービスエリア内にあり、本体を取り付けたい場所がソフトバンクのLTE電波が良好であるか事前に確認をお願いいたします。
届かない場合は、WiFi環境で動くモデルもございます。

画像を確認いただく端末が必要です

インターネットに接続できるPCやスマホ、タブレットはお持ちでしょうか？
※画像確認用の端末のお貸出しはございません

ナースコール接続ご希望の場合はナースコールの情報が必要です

施設様にあるナースコールとの接続をご希望でしょうか？
接続ご希望の場合には、下記情報を教えていただく必要がございます。

- ・ ナースコールメーカー名
- ・ 居室の差入口の写真
- ・ 呼び出しボタンの品番（わかればで構いません）

【設置につきまして】



専用スタンドを使用して本体を設置いたします。
設置場所はベッドの頭側ですので、写真のように壁とベッドの間にスタンドを設置いたします。

